

HMI[®] DENTASPRAY HMI[®] IDO SPRAY



HMI

БЪРЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УСТОЙЧИВИ НА АЛКОХОЛ ПОВЪРХНОСТИ И ПРЕДМЕТИ

За професионална употреба

- Бърза дезинфекция на алкохолна основа
- Формула без алдехиди, без оксидиращи агенти
- Съдържа корозионен инхибитор – предпазва третираните повърхности и предмети
- Кратка експозиция и широк спектър на действие
- Пълно вирусоцидно действие (включително вирусите *HAV, HBV, HCV, HIV, Influenza Virus, Herpesvirus, Rotavirus, Enterovirus, Papillomavirus, Polyomavirus*)
- Не оставя следи по третираните повърхности
- Спрей форма, позволяваща третиране и на труднодостъпни повърхности и предмети
- Не се налага изплакване след обработка
- Готов за употреба – прилага се неразреден

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности, включително на оборудване, апаратура, прибори, предмети

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

- Бактерицидно (вкл. MRSA)
- Фунгицидно (вкл. дрождецидно)
- Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
- Вирусоцидно

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ	ЕКСПОЗИЦИЯ
Вирусоцидно (<i>M. Norovirus</i>)	15 sec
Бактерицидно (вкл. MRSA); Дрождецидно (<i>C. albicans</i>); Туберкулоцидно; Вирусоцидно (<i>M. Norovirus; Adenovirus</i>)	30 sec
Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно; Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно); Вирусоцидно	60 sec

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Течност без цвят
- Готов за употреба
- Срок на годност: 2 години

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

- Третираните повърхности и предмети се напръскват с дезинфектанта от разстояние около 25-30 cm (малко повече от една педя) или се обтриват с напоена с дезинфектанта чиста кърпа
- Повърхностите трябва да останат напълно омокнени до изтичане на експозиционното време, след което се оставят да изсъхнат
- Електрическите уреди следва да са изключени, а нагорещените повърхности – изстинали, преди прилагане на дезинфектанта

Experience & Quality
www.hmi-company.com



HYGIENE MEDICAL INDUSTRY Co., Ltd.

81 A, N.Gabrovski str., 5000 Veliko Tarnovo, Bulgaria, tel./fax: +359 62 634 609;
+359 62 622 429; e-mail: head_office@hmi-company.com; www.hmi-company.com



Certified Company

стр.1/2

HMI[®] DENTASPRAY HMI[®] IDO SPRAY



HMI

БЪРЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УСТОЙЧИВИ НА АЛКОХОЛ ПОВЪРХНОСТИ И ПРЕДМЕТИ

За професионална употреба

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Етанол (72%)

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Внимание. Спазвайте препоръките за безопасност при употребата на продукта.
- Да се съхранява извън обсега на деца.
- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено.
- Съдът да се съхранява плътно затворен.
- ПРИ ПОЖАР: Използвайте прах, устойчива на алкохол пяна, водна мъгла или въглероден диоксид, за да загасите.
- Не смесвайте с други продукти
- Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място
- Препоръчителна температура на съхранение: от +15°C до +25°C
- Да не се извършват манипулации в близост до открит пламък. Да не се съхранява близо до горими материали. Опаковките, които са били отворяни, трябва да бъдат внимателно затворени повторно и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив
- Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, когато е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране продукти се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в канализацията, освен в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни органи. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират само след пълното изразходване на продукта

ОПАКОВКИ

- Бутилка 0.500 L с пулверизатор, 20 броя в кашон
- Бутилка 1.000 L с пулверизатор, 12 броя в кашон
- Бутилка 1.000 L, 12 броя в кашон
- Туба 5.000 L

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД №2536-1/16.04.2019

Experience & Quality
www.hmi-company.com



HYGIENE MEDICAL INDUSTRY Co., Ltd.

81 A, N.Gabrovski str., 5000 Veliko Tarnovo, Bulgaria, tel./fax: +359 62 634 609;
+359 62 622 429; e-mail: head_office@hmi-company.com; www.hmi-company.com



Certified Company

стр.2/2