

AMALGAMATOR

MODEL:DB-338

MANUAL DE FUNCȚIONARE
ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru ca aparatul sa functioneze,
trebuie indepartata placuta metalica
anexata intre picioarele aparatului



△ ATENȚIE:

VĂ RUGĂM, SCOATEȚI CELE DOUĂ ȘURUBURI
ROȘII DE LA CAPĂTUL AMALGAMATORULUI ÎNAINTE
DE FOLOSIRE!

Ver. 2.1 Data reviziei :2016-09-20

1. Introducere

Vă mulțumim pentru încrederea acordată amalgamatorului. Acest dispozitiv are microprocesor pentru control; are funcția de a seta exact timpul de funcționare și este acționat mult mai ușor. Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe să utilizați amalgamatorul și păstrați-l în apropiere de amalgamator.

2. Folosire

Acest amalgamator este folosit pentru a amesteca pulbera cu lichidul și pentru a amesteca aliajul în cel mai bun mod. Deci, calitatea nivelului de recuperare a dinților este ridicată. Se folosește în locul vechii metode manuale, nu numai că se face ușor, dar reduce și poluarea cu substanțe din cabinetul stomatologului. Așadar este sănătos pentru organismul uman.

3. Date tehnice

Siguranța electrică: Gradul II, Tip B

Alimentare electrică: AC 110±11V,60Hz

Sau AC 220±22V,50/60Hz

Consum de energie:200VA

Frecvența de oscilare :> 4000/Min.

Siguranța:2A(220V) or 3A(110V),⁵x20mm

Condiții de funcționare

Temperatura de lucru: 5~40° C

RH:<80%

Condiții de depozitare

Temperatura: -40~~ 55° C

RH:<80%

4. Metoda de funcționare

Alegeți capsule fine de pulbere cu lichid.

Apăsăți capacul din partea superioară a capsulei înspre interiorul capsulei

lăsați pulberea interioară în strâns contact cu lichidul .

Deschideți capacul de protecție transparent, fixați capsula pe suportul amalgamatorului, apoi închideți capacul.

Reglarea timpului

Apăsăți tasta „♦” pentru a seta un timp mai mare, apăsați tasta „■” pentru a seta un timp mai scurt.

Apăsăți tasta „> / ■”, amalgamatorul începe să funcționeze și se oprește la momentul la care a fost reglat. Dacă doriți să opriți un amalgamator în timpul funcționării, apăsați din nou tasta '> / ■’.

Când amalgamatorul se oprește din funcționare, atunci puteți deschide capacul și scoate capsula de amalgamator care poate fi folosită.

5. Important

Folosiți un scaun cu protecție la nivelul solului și un triplu ștecher .

Înainte de a apăsa tasta > / ■ pentru a comanda oscilarea amalgamatorului, capacul de protecție trebuie închis.

6. Întreținere

Împărțiți în secțiuni periodic părțile rotative.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că, atunci când deschideți o cutie cu un amalgamator nou, scoateți cele două șuruburi care sunt utilizate la transport pentru a fixa amalgamatorul.

7. Depanare

Nr.	Problemă	Metoda de rezolvare
1	Ecranul LCD nu are afișaj numeric	Verificați siguranța
2	Suportul capsulelor oscilează slab	Verificați partea de cauciuc care o pune în mișcare

8. Garanție

Dacă dispozitivul nu poate funcționa normal din cauza calității produsului,

acesta va fi reparat sau i se vor schimba piese și chiar întregul dispozitiv în mod gratuit de către companie, de la data la care acesta a fost expediat din fabrică și până la 2 ani, dar piesele de unică folosință, precum și siguranțele, nu pot fi incluse.