



## Incidin<sup>®</sup> active

Produs concentrat pe baza de oxigen activ

### SPORICID. SIGUR.

Dezinfectia puternica a suprafetelor combinata cu proprietatile excelente de curatare sunt caracteristice pentru Incidin<sup>®</sup> active. Sistemul "PerOxyBalance<sup>®</sup>" de generare a acidului peracetic are capacitatea de a distruge toate tipurile de virusuri. Incidin<sup>®</sup> active indeplineste cerintele unei game largi de standarde internationale de testare, facand ca acesta sa fie un produs de incredere pentru toate zonele cu risc inalt.



# Incidin® active

PerOxyBalance®

Oferta noastra	Beneficiile dumneavoastra
Eficacitate extinsa bactericida, levuricida, virucida, si sporicida, inclusiv Clostridium difficile	Recomandat pentru unitatile de terapie intensiva si zonele cu risc inalt
pH neutru al solutiei de lucru	Compatibilitate excelenta cu materialele, poate fi utilizat pe dispozitive medicale, pardoseli si pereti
Performante excelente de curatare si dezinfectie intr-o singura etapa	Economie de timp pentru utilizatori



Dezinfectant sporicid pentru dispozitive medicale ☹☹ 0297



Dezinfectant sporicid pentru toate tipurile de suprafete

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Preparati o solutie 2%: Adaugati 20g de pulbere (1 masura de dozare) la 1L de apa sau goliti continutul unui plic de 160g in 8L de apa. Amestecati solutia de cateva ori. Dupa 15 minute solutia este gata de utilizare. Umectati complet suprafetele conform procedurilor corespunzatoare.

## INGREDIENTE

Substanta activa in solutia de 20g/L (2%): > 1000 mg/L (ppm) acid peracetic. Substanta activa, acidul peracetic se formeaza la prepararea solutiei de lucru.

## REZULTATE TESTARI MICROBIOLOGICE SI VIRUSOLOGICE

	Concentratie		Timp de contact
	%	g/L	
EN 13727 Bactericid	1.0	10	5 min
EN 13624 Levuricid	1.0	10	5 min
Dezinfectia suprafetelor cu actiune mecanica conf. DGMH (2001) (bactericid, levuricid, tuberculocid)	2.0	10	5 min
EN 14348 Tuberculocid	1.0	10	15 min
EN 13704 Sporicid	2.0	20	15 min
EN 14476 Virucid	2.0	20	10 min

## AMBALARE SI DATE PENTRU COMANDA

**Incidin® active** 3051870  
160 g plic 24 x 160 g

**Incidin® active** 3051850  
1,5kg galetusa 4 x 1,5 kg

Numai pentru utilizatori profesionali. Utilizati dezinfectantii in siguranta. Cititi intotdeauna informatiile despre produs inainte de utilizare.



Incidin® active

**PerOxyBalance®**

Substanta activa cu sistemul "Oxy Power"

Sistemul PerOxyBalance® stabileste noi standarde in domeniul dezinfectiei de nivel inalt, prin combinarea proprietatilor puternice de curatare si compatibilitatea optima cu materialele.

**Ecolab Healthcare**  
Clean. Safe. Healthy.

**Ecolab SRL.**

Centrul de afaceri "IDEO", Sos. Pacurari nr. 138 et. 2, 700545 - Iasi Tel.: 0232222210  
www.ecolab.com

**Ecolab Europe GmbH**

Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

**ECOLAB®**