

INSTRUKSJONER FOR BRUK - NO

MM-Paste

Kalsiumhydroksid midlertidigfyllingsmateriale

BRUKSANVISNING

Vannløselig

Bruksområde

- eksponert pulpa, pulpkapping og pulpotomi
- kanal-lekkasje
- apeksifisering
- dannelselse av hardvevsbarriere
- rotkanalfyllingsmateriale



BRUKSANVISNING

Rens og tørk rotkanalen etter preparasjon.

Sett på engangsspiss på sprøyten og fest så støttingen for en lett innføring i kanalen

Desifiner engangsspissen med etanol

Fyll kanalen helt ved å presse ned stemplet på sprøyten mens du trekker sakte tilbake

Fjern overskuddsmateriale med en steril bomullspellet

Fjern den brukte engangsspissen, sett på en ny og dekk med toppskruen.

HVORDAN BRUKE STØTTERINGEN

I kontakt med luft kan innholdet begynne herdingsprosessen. Derfor er det nødvendig å dekke tuppen av sprøyten med toppskruen etter bruk.

Hvis en bruker støttingen på sprøytespissen så blir den mer brukervennlig og kan også brukes til å stramme eller løsne sprøytespissen.

FORDELER

Enkel rengjøring og fjerning av overskudd

Utmerket antibakteriell effekt og radioopasitet

Forhåndsblandet materiale i sprøyte

Utmerket tilgjengelighet til rotkanalen

Unngår krysskontaminering

INNHold

2.2 gram pasta i sprøyte

Engangsspisser

En støtting for kontrollert innføring av sprøytespissen

OPPBEVARING

Ikke overfyll forbi apeks

Kun for dentalt bruk

Brukes ikke hos personer med allergi

Ha på toppskruen hele tiden når sprøyten ikke er i bruk

Oppbevar i et tørt og kaldt rom for å unngå herding av produktet

HOLDBARHET

2 år fra produsentens dato.

	Utløpsdato	LOT	Batchkode
	CE-merking og identifikasjonsnummer til det meldte organet Produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 93/Direktiv 93/42/EEC om utstyr	EC REP	Autorisert representant i EU
	Se brukerhåndboken		Maker


Laget i Korea

Ref. 60300733-G

06/22

META BIOMED CO.,LTD.

270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea

 Year of CE-mårkning /
Année apposition
marquage CE : 2010

EC **REP** **Meta Biomed Europe GmbH**
Wiesenstr. 35, 45473 Mülheim
an der Ruhr, Germany

Imported in UE by Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel 25000 BESANCON, France
Tél. : +33 3 81 54 42 42
www.micro-mega.com